
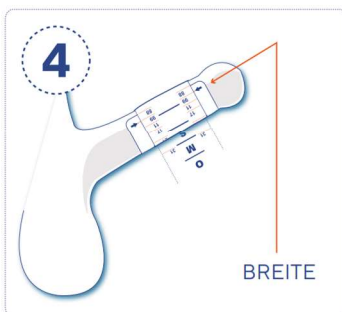
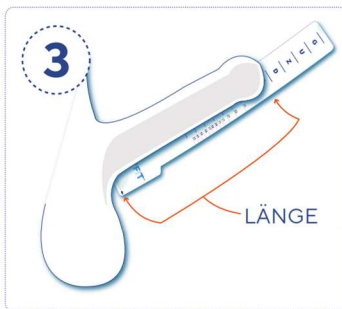
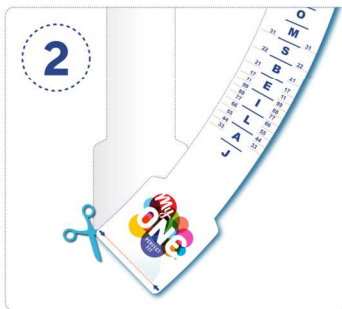


Wir stellen myONE® vor – das weltweit erste passgenaue Kondom in 66 verschiedenen Größen. Da bleiben Lust und Komfort nicht auf der Strecke.

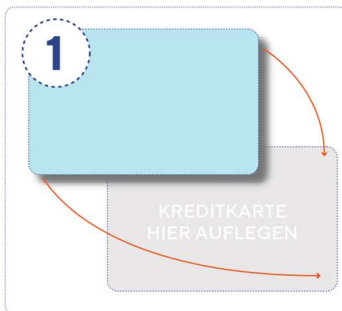

Anleitung zum FitKit™

1. SCHRITT: Drucke dein FitKit aus. Achte darauf, das FitKit korrekt auszudrucken, damit du deine Größe richtig ermitteln kannst. Lege zur Kontrolle eine Kreditkarte auf die nachstehende Abbildung. Passt die Karte, dann passt auch dein Glied. Fehlerbehebung bei Druckerproblemen: Meist liegt es an der Skalierung des Druckers, wenn das FitKit nicht richtig passt. Deaktiviere die Skalierung des Druckers und vergewissere dich, dass du das Dokument in einer Größe von 100 % ausdruckst.

2. SCHRITT: Schneide das Maß aus. Die Buchstaben geben die Länge an, die Zahlen die Breite.

3. SCHRITT: Bestimme deine Länge. Lege das Maß mit dem breiten Ende zu dir gewandt unter dein erigiertes Glied. Achte darauf, dass der Rand des FitKits auf der Höhe der Wurzel deines Glieds liegt, damit der gesamte Penischaft abgedeckt wird. Der Buchstabe über der Spitze deines Glieds gibt deine Größe an.

4. SCHRITT: Bestimme deine Breite. Lege das Maß behutsam um die Mitte deines erigierten Gliedes. Deine Breite kannst du dort ablesen, wo die Pfeile auf die Zahlen treffen. Wenn deine Größe zwischen zwei Zahlen liegt, wähle die näherliegende Zahl.

5. SCHRITT: Bestimme deine Größe. Kombiniere den Buchstaben für deine Länge mit der Zahl für deine Breite, um deine myONE-Kondomgröße zu bestimmen. Kondome erhältst du auf myonecondoms.com oder bei einem Händler in deiner Nähe.

Bitte beachte: Deine myONE-Größe ist ein Größenvorschlag, der auf deinen Messwerten basiert. Je nach persönlicher Präferenz kannst du auch eine leicht abweichende Größe wählen. Wird deine Kombination nicht angezeigt, wähle eine ähnliche Größe. Das Kondom sollte besser etwas zu lang oder zu schmal sein statt zu breit oder zu kurz. Die Größe ist dann richtig, wenn das Kondom angenehm sitzt und nicht verrutschen kann. Scheue dich nicht, mehr als eine Buchstaben-Zahlen-Kombination auszuprobieren!

